

新一代 开模机



使用说明书

敬爱的用户：

欢迎您使用本厂生产的新一代开模机，这是极为方便使用的开模机。在首次使用前，请您仔细阅读说明书，使其帮助您掌握使用方法，并且能延长机器的使用寿命。

一、警告

在你未通读，完全弄懂所有说明、规则之前，切勿去操作机器，未按手册的规定会导致火灾、触电或个人的损伤等事故。

为了一贯的安全操作或指导他人，请多阅读手册。

注意：对于操作者因为粗心或忽视预防规则而引起的事故，制造者不负有任何责任或义务。


二、预防

1. 除了镜片开模，请不要将机器用作他用。
2. 当机器工作时不要碰到机器上的铣刀以免受伤。
3. 在电源不能达到要求时(电压和频率)，不要使用这台机器，您必须明确使用的电源的具体情况。
4. 不要把机器放在高温或阳光直射的地方。
5. 假如有任何液体或材料进入机器的内部，要立刻关掉开关，并拔掉电源插头，直到机器被行家检查修理后，才可以重新工作。
6. 除了机器的原件，请不要去组装别的零件。
7. 不要让机器负荷过重，不要冲撞机器中的任何零件。
8. 如果在一段时间内不使用机器，请拔掉电源插头。

三、使用步骤

1. 将眼镜镜框上要做模板的衬片或镜片取下来，用吸盘固定在衬片或镜片中心位置，然后安装到镜片固定座上，旋转夹片手柄夹紧；
2. 把准备好的模板安装到模板座上（如图），用螺帽固定好；
3. 将机头慢慢地放下，使模板在铣刀的中心位置，拧紧机头固定旋钮，盖上防护罩，以免粉末飞出；
4. 打开电源开关，机头轴和铣刀旋转切割模板，当模板转动一圈后，将机头向上提起，小心地将做好模板卸下，放在自动磨边机上磨镜片即可使用。

四、各部分构件名称

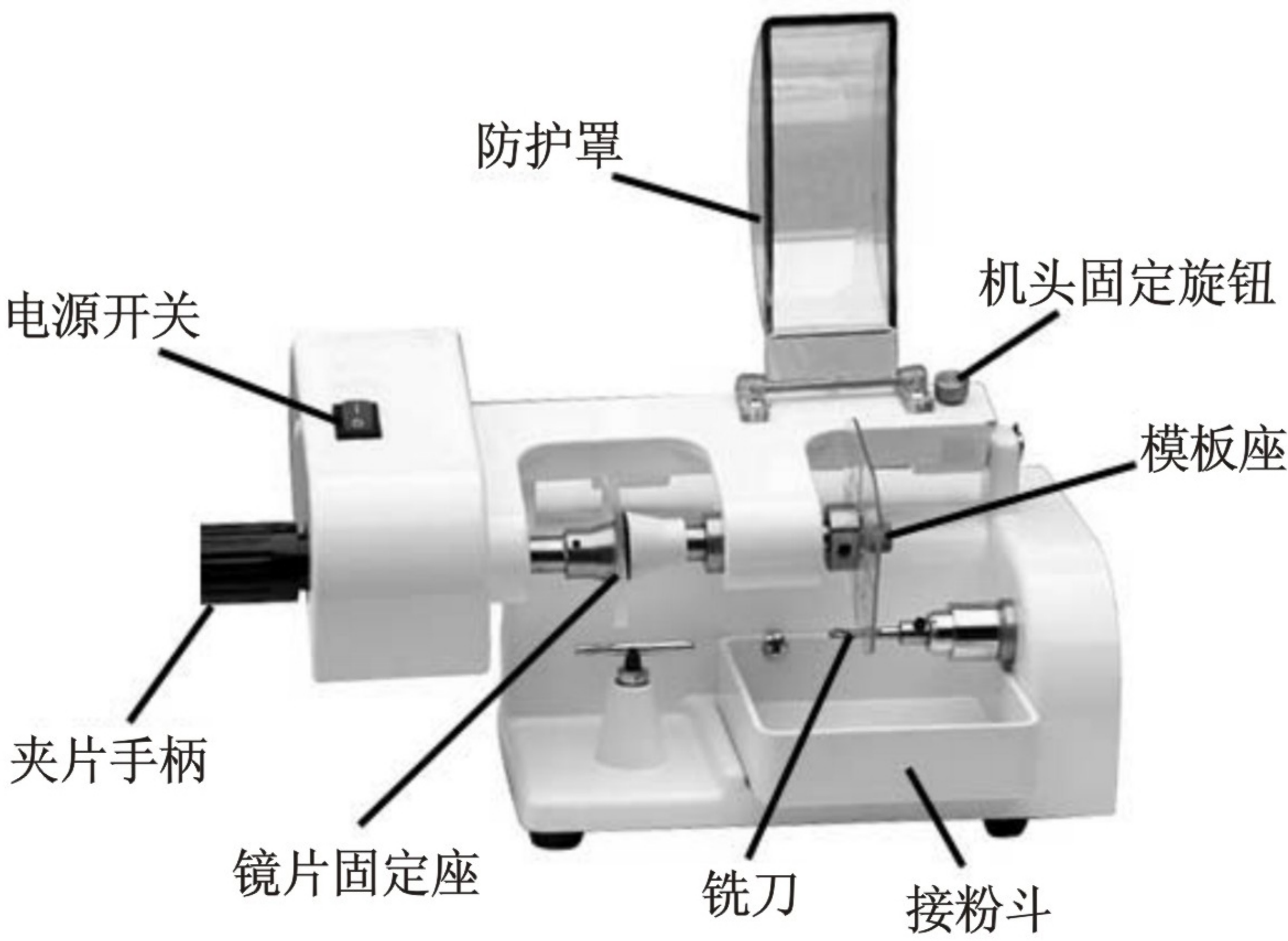

台州市椒江良友眼镜设备制造厂

地址：浙江省台州市椒江区洪家街道王桥村 2-54 号

电话：0086-576-88017788

传真：0086-576-88017799

<http://www.zj-ly.com.cn> <http://www.良友.net>

E-mail: kuiliangwang@gmail.com